



ELEKTRİKLI ENGELLİ SANDALYESİ GRUBU
Kullanım ve Bakım Klavuzu

ÖNSÖZ

Sayın Müşterimiz

TANITIM

Ana Parçalar ve Görünümü

ÜRÜN BİLGİSİ

Ürün Performansı

Ana Yapısı

Kullanma Aralığı

GÜVENLİK TALİMATI

Sürüş Notları

Bakıcılar tarafından Eşlik Edilmesi veya Sürüş Esnasında

Kaçınılacak Durumlar

Yokuş Yukarı Çıkmak ve İnmek için Önlemler

Bakıcıların Dikkat Etmesi Gerekenler

DİĞER NOTLAR

Onarım ve Yenilenme

Çevrenin Korunması

Kuru Depoda Saklama

Servis Ömrü

Elektromanyetik Etkileşimlerden Korunması

AYARLAMALAR

Tekerlekli Sandalyenin Ayarlanması

AKÜ VE ŞARJ ALETİ

Şarj Aleti Araçları

Şarj Aleti Teknik Verileri

Şarj Aleti Kullanımı

Akünün Muhafazası

Sistem Tanıma

SİSTEM TANIMA

Sinyal Gösteges

KUMANDA

Kumanda Paneli

Kumandanın Kullanımı

BAKIM

Tekerlekli Sandalyenin Temizliği ve Akünün Bakımı

Tekerler

Akü

Bakım ve Kontrol Listesi

DİĞERLERİ

Taşıma ve Saklama için koşullar

Ana Güvenlik Özellikleri

Akü kurulum talimatı

Teknik Veriler

ÜRÜN BİLGİSİ

Teknik Veriler

GARANTİ ŞARTLARI

Sayın Müşterimiz

Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Bu kullanma kılavuzu kullanma, kurulum metotları ve basit sorunlara çözümleri içerir.

Bu kullanma kılavuzu JRWD201, JRWD1002, JRWD301, JRWD601 modelinde kullanılır.

Bu kullanma kılavuzu tekerlekli sandalye bakımı ve control metotlarını içerir, lütfen onu uygun bir yere koyunuz.

Lütfen bu kullanma kılavuzunu bu tekerlekli sandalyeyi kullanan diğer insanlara referans olarak temin ediniz.

Kalite geliştirilmesinden yada tasarımdan dolayı bu klavuzdaki bilgi notları ve açıklamalar üründen biraz farklı olabilir.

Herhangi bir anlaşılmazlık yada sorunuz varsa, bayiniz ile iletişime geçiniz.

Herhangi aracın kötü kullanımı kazaya yol açabilir. Kötü sürüş kendinize yada başkalarına zarar verebilir.

Bu elektrikli tekerlekli sandalye yürüyemeyen veya zor yürüyebilen insanların rahatlıkla taşınabilmesi için tasarlanmıştır.

Bu elektrikli tekerlekli sandalye sadece 1 kişiyi taşımak için dizayn edilmiştir.

Bu kullanma klavuzunda kullanılan semboller

Bu sembolün yakınındaki talimatları izleyiniz.

Bu talimatlara dikkatli önem harcamamak çevreye yada tekerlekli sandalyede fiziksel hasar yada zararlar sonuçlanabilir.




Sağlıklı Günler Dileriz.

Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.

yuki
motor

Ana Parçalar ve Görünüm

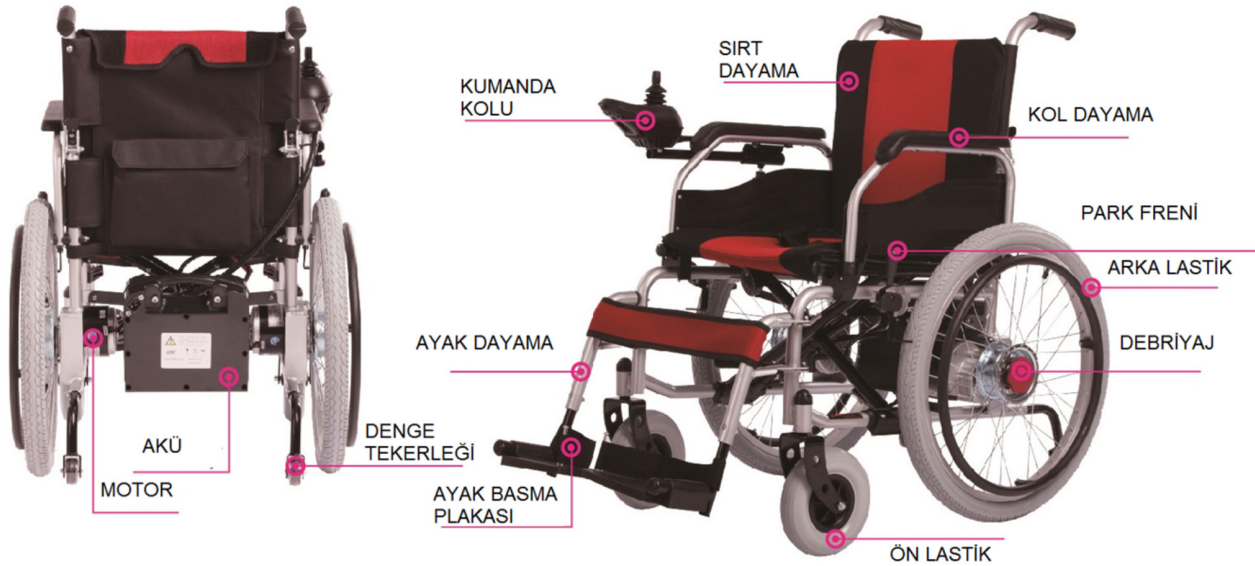

Ürün Performansı

Elektrikli tekerlekli sandalyelerin bu serileri akü tarafından güçlendirilir, DC motor ile çalışır. Kullanıcı, joystick kumanda ile direksiyon ve hız ayarını kontrol eder. Bu elektrikli tekerlekli sandalyeler düşük hız kullanımı, iyi yol şartları ve küçük eğimler için uygundur.

Ana Yapısı

Elektrikli tekerlekli bisikletlerin bu serileri iki bölümün birleşiminden oluşur:

- 1)Şase Bölümü: Şase, teker, ayak dayama, kol dayama, sırt dayama vs.
- 2)Elektrikli Bölüm: Kumanda paneli, motor, akü.

Kullanma Aralığı

Elektrikli tekerlekli sandalye engelli ve yaşlı insanlar(100 kg'dan az) için yürüme aracıdır, orta mesafeli açık alanlarda kullanıma uygundur. Otobanlarda kullanmayınız.

Sürüş Notları

- Lütfen tekerlekli sandalyeyi kontrol ederken ellerinizi kol dayamağında tutunuz.
- Lütfen tekerlekli sandalyeyi düzgünce kullanana kadar güvenli açık alanlarda yada parklarda pratik yapınız.
- Yuvarlak daireler, durma ve ileriye hareket etme gibi ana prensiplerini öğrenmek için güvenli bir yerde iyice sürüş pratiği yapınız.
- Yola çıkmadan önce, lütfen bakıcınız yanınızda gelerek tekerlekli sandalyenin güvenliğini teyit etsin.
- Lütfen yayaaların trafik kurallarına dikkatle uyunuz, kendinize araç sürücüsü olarak görmeyiniz.
- Lütfen kaldırım ve yaya geçitlerinde kullanınız. Araç hattında kullanmayınız.
- Virajlardan ve 'S' kavislerinden kaçınarak sabit şekilde kullanınız.
- Lütfen pnömomatik lastiklerin basıncını sabitleyiniz, anormal lastik basıncı sallantılı sürmeye yada akımın aşırı kaybinaneden olabilir.

Bakıcılar tarafından Eşlik Edilmesi veya Sürüş Esnasında Kaçınılacak Durumlar

- Kötü havalarda sürmek, örneğin yağmurlu günlerde, ağır sis, kuvvetli rüzgar, kar vs.
- Tekerlekli sandalye ıslandığı takdirde, hemen kurutulur.
- Kötü yol şartlarında sürmek, örneğin çamurlu, patika, kumlu, çakıllı vs.
- Kalabalık yolda sürmek
- Çitle çevrili olmayan çukur yada su birikintisinde sürmek vs.
- Raylı yolda karşıya geçmek.

Raylı yolda kullanmak zorunda kaldığınızda, kapama butonuna basarak güvenliğini teyit ediniz ve tekerlerin raya saplanmayacağından emin olunuz. Elektrikli tekerlekli sandalye sadece kişisel kullanım içindir, insan yada eşya taşımayınız, ve eşya çekmek amaçlı kullanmayınız.

Yokuş Yukarı Çıkmak ve İnmek için Önlemler

- Dik tepelerde,yüksek yerlerde,kanallarda vs. kullanmaktan kaçınınız.
- Dik yamaçlarda kullanmaktan kaçınınız. Eğim açısı 9 dereceden kısa olmalıdır. Lütfen eğim üzerinde sürerken kumandayı dikkatli kullanınız.
- Yokuş yukarı çıkışlar yada inişler boyunca hareketi/hızı sabit olarak sürdürünüz.
- Dik yerlerde kaldırırda kullanmaktan kaçınınız.
- Merdiven üzerinde kullanmak yasaktır ve yüksek dikliklerde karşıdan karşıya geçmekten kaçınınız.
- Geniş çukurlarda karşıdan karşıya geçmekten kaçınınız.
- Çukur geçişler boyunca, çukur ve tekerler arasında 90° açısını korununuz.

*Tekerlekli sandalyeyi manuel modda yokuş yukarı çıkarken ve inerken ayarlamayınız.
Trafik geçitlerinde tekerlekli sandalye arızalandığında,lütfen hemen etraftaki insanlardan yardım isteyiniz
ve tekerlekli sandalyeyi manuel moda ayarlayınız sonra tekerlekli sandalyeyi ortamdan uzaklaştırmak için
itiniz, yada hemen güvenli bir alana götürülmenizi isteyiniz.*

Bakıcıların Dikkat Etmesi Gerekenler

- Bakıcılar, kullanıcının ayaklarının ayak dayamalıta uygun pozisyonda ve kullanıcının elbisesinin tekerleklere takılmayacağını teyit etmelidir.
- Bakıcılar, dik yada uzun eğimler üzerinde güvenli hareketi sağlamak için tekerlekli sandalyeyi itmelidir.

Onarım ve Yenilenme

Eğer tamir etmek yada modifikasyon gerekiyse, lütfen satıcınız ile irtibata geçiniz. Kendiniz modifiye etmeyiniz, arıza yada kazalara yol açabilir.

Çevrenin Korunması

Çevreyi korumak için kullanılmayan tekerlekli sandalyeleri ve eskimiş aküleri gelişi güzel atmayınız. Lütfen yeni akü ihtiyacınız için satıcınız ile irtibata geçiniz.

Kuru Depoda Saklama

Tekerlekli sandalyeleri nemli ortamlarda örneğin banyo yanında, bırakmayınız. Eğer tekerlekli sandalye yağmurda ıslanırsa, suyu hemen kurutunuz.

Parçaların yada materyallerin yerini rastgele değiştirmeyiniz. Rasgele ağırlık eklemeyiniz, denge problemine sebep olabilir. Tekerlekli sandalye üzerinde oturan bir kişi varken yada manuel moddayken, tekerlekli sandalyeyi itmek yada çekmek için başka bir araç kullanmayınız. Anormal sesler duyduğunuzda, hemen servisle irtibata geçiniz.

Servis Ömrü

Servis ömrü teslim tarihinden sonra 10 yıldır. Kullanıcı beklenmeyen kazaların ihtimaline karşın servis ömründen daha fazla kullanmamalıdır.

Elektromanyetik Etkileşimlerden Korunması


Tekerlekli sandalye güçlü manyetik alanlardan ve indüktif elektrik ekipmanlarından örneğin radio, TV ve cep telefonu istasyonları, uzak tutulmalıdır.Eğer yakınlarında elektromanyetik etkileşim kaynağı varsa,mümkün olduğunca elektromanyetik etkileşim kaynağından uzak tutmaya dikkat ediniz.Elektrikli tekerlekli sandalye elektromanyetik etkileşimlerden kaçınılmalıdır.

*Tekerlekli Sandalyenin Ayarlanması***Katlanmış Tekerlekli Sandalye**

Birinci Adım: Aküyü çıkartınız ve kırmızı soketi çekiniz. (Resim 1-a);

İkinci Adım: Birleştirme sivicini geri çekiniz bu arada kolu da geri çekiniz. (Resim 1-b ve 1-c);

Üçüncü Adım: Elleriyle yastığı kuvvetle kaldırınız, tekerlekli sandalyeyi katlayınız. (Resim 1-d).

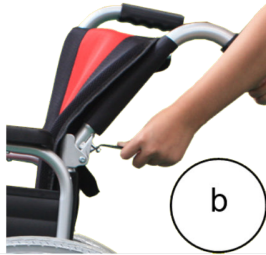

*Tekerlekli Sandalyenin Ayarlanması***Katlanmamış Tekerlekli Sandalye**

Tekerlekli sandalye yarı gergin durumdayken, klik sesini duyan kadar yanlardaki kolları yukarı çeviriniz ve sallanmadığını kontrol ediniz.

Ana Tesiat Bağlantısı

Akü kutusunun soketini kumandanın soketine bağlayınız. (Resim 2)

Joystick Ayarlanması

Saat yönünün tersine vidayı vidalayarak kumandayı kullanılabilir duruma ayarlayınız (Resim 3). Ayar yapıldığında vida sıkıca vidalanmalıdır.

Ayak Dayama Montajı ve Sökümü

Şase borusunun içine ayak dayamayı kurunuz, ve sabit pozisyonu dışarıdan ortaya hareket ettiriniz; Sökmek için, plastic parçayı dışarıya doğru itiniz sonra ayak dayamayı kaldırınız. (Resim 4)

*Tekerlekli Sandalyenin Ayarlanması***Denge Tekerleği Ayarlanması**

Vidayı çıkararak denge tekerleği açısını ayarlayınız. (Resim 5).

El Park Freni Kullanımı

Arka tekeri durdururken manuel freni ileriye sertçe itiniz. El frenini serbest bırakınız,tekerlekli sandalye normal sürüş durumuna geri dönecektir. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre manuel mod yada güç modunu seçebilirler.(Resim 6)

Elektrikli Mod ve Manuel Mod Arasındaki Buton

Manuel Mod: Öncelikle gücü ve freni kapat,oyuğun dışındaki debriyaji(kırmızı parça) çekiniz ve 45° döndürünüz(Resim 7-1). Elektrikli Mod: Debriyaji(kırmızı parça) döndür ve oyuğun içine geri koy.Bir klik sesi duyana kara tekerlekli sandalyeyi hafifçe itiniz. (Resim 7-2).

Manuel moddan elektrikli moda çevirirken,yanlardaki debriyajların oyukların içine girdiğini teyit ediniz. Debriyajlardan herhangi biri oyuğa tam olarak girmediyse, tekerlekli sandalyenin devrilme tehlikesineyol açabilir. Kullanıcılar, eğimli alanlarda tekerlekli sandalyeyi sürerken manuel modda kullanmayınız.

Şarj Aleti Araçları

Şarj aleti akü şarjı için kullanılır. Elektrikli tekerlekli sandalye şarj olurken, kullanmayınız.

Şarj Aleti Teknik Verileri

Giriş Voltajı: AC 220V (110V) $\pm 10\%$ Çıkış Voltajı: 24V/DC Çıkış Akımı: 4A

Şarj Aleti Kullanımı

Aküyü şarj etmek için,akü kutusunun soketi ve güç verici ile şarj aletini bağlayınız. Şarj etmeyi tamamlamak için aşağıdaki adımları izleyiniz:

Adım 1: Şarj aleti oyğunun bloke olmadığına emin olunuz.

Adım 2: Elektrikli tekerlekli sandalyenin gücünün kapalı olduğuna emin olunuz.

Adım 3: Akü kutusu ve kumandayı bağlayan soketi fişten çıkartınız.

Adım 4: Akü kutusunun güç soketini şarj aletinin çıkış soketine bağlayınız

Adım 5: Güç vericiye şaj aletinin ana soketini bağlayınız, kırmızı ışık yanacaktır. Tamamen şarj etmek için 8-10 saa gerekir.24 saatte fazla şarjda tutmayınız.

Adım 6: Akü ömrünün kısılmasını önlemek için,tekerlekli sandalyeyi kullanmadığınızda en az ayda bir kez aküyü lütfen şarj ediniz.aşağıdaki adımları izleyiniz:



- ❑ Şarj doluncaya kadar şarj etmeyi durdurmayınız. Tamamen şarj dolmayan aküyü kullanmayı tekrarlamak akünün ömrünü kısaltacaktır. Bu yüzden mümkün olduğunca akü tamamen şarj edilmelidir.
- ❑ Akü tamamen şarj olduğunda,güç göstergesi yeşil renge dönecektir. Tamamen şarjı dolmadan şarj etmeyi durdurmayınız.
- ❑ Şarj etmek bittikten sonra,güç vericiyi kapatınız,aksi halde akü yavaş yavaş boşalacaktır. 24 saatten fazla şarj etmeyiniz. Aşırı şarj etmek tehlikelidir.
- ❑ Kullanıcılar şarj âleti tehlikelerinden kaçınmak için aşağıdaki kuralları izlemelidir Güneşli yada nemli ortamda tekerlekli sandalyeyi bırakmayınız.
- ❑ Elektrikli tekerlekli sandalye şarj âleti içermez, lütfen uluslararası kullanılan çıkıi voltaı 24V/DC 4A kullanınız.
- ❑ Şarj ederken çok iyi havalandırılmalıdır. Güneşli yada nemli ortamda tekerlekli sandalyeyi patlatmayınız.
- ❑ Şarj etme ortam sıcaklığı 100 'tan 500 ' a kadardır. Eğer bu ortam sıcaklığının oranlarının dışına çıkarsa, akü iyi performans vermez ve kolayca zarar görür.
- ❑ Şarj etme süresince havalandırma için bir ses yapması normaldir. Bu şarj âletini soğuttuğunu gösterir. Lütfen bu yüzden endişelenmeyiniz. Şarj âletinin içine şarj ettiği sürece sıvı girmesini önleyiniz ve şarj âletini yanıcı maddelerin üzerine koymayınız örneğin yakıt, ayak dayama,koltuk minderi vs.

Akünün Muhafazası

Yerleştirilen akünün yanlış çalıştırılması tehlikeli patlamaya neden olabilir..Sadece aynı yada önerilen şekilde aküler değiştirmeye uygundur. Lütfen akü kutuplarını doğru bağladığınıza emin olunuz.Akü ömrünü uzatmak için püf noktalar:Sık sık şarj etmek, akü gücünü kaybetmemek. En iyisi eğer tekerlekli sandalyeyi kullanmıyorsanız, aküyü tamamen şarj ediniz. Eğer uzun zaman kullanmazsanız, ayda iki defa şarj etmek iyidir.

Lütfen akü şarj olurken alevlerden uzak tutunuz.Alevler akünün yanmasına yada patlamasına neden olabilir. Şarj atmeyi hidrojen yapar, şarj ederken sigara içmeyiniz.Soket yada elleriniz ıslak olduğunda güç vericiyi fişten çıkarmayınız,güç elektrik şokuna neden olabilir. Beklenmeyen kazalar olacaktır ve kullanıcıya zarar verecektir, şarj olma esnasında elektrikli tekerlekli sandalyeye oturmayınız ve elektrikli tekerlekli sandalyeyi kullanmayınız.

Sistem Tanıma


Gösterge LED ışıkları yanıp sönmeye başladığı zaman, bunun anlamı tekerlekli sandalyede sorun vardır. Motor, fren, akü, bağlantı teller vs. parçalardan sorun meydana gelebilir. Ürünün kullanma kılavuzuna istinaden,anormal durumların nedeni tanıma sinyalleri tarafından belirlenebilir.Bu anormal durum diğer servis takımları olmadan belirlenebilir.

Gösterge LED ışıkları yanıp sönmeye başladığı zaman, bunun anlamı tekerlekli sandalyede sorun vardır. Motor, fren, akü, bağlantı teller vs. parçalardan sorun meydana gelebilir. Ürünün kullanma kılavuzuna istinaden, anormal durumların nedeni tanıma sinyalleri tarafından belirlenebilir. Bu anormal durum diğer servis takımları olmadan belirlenebilir.

Sinyal Göstegesı

Led Işıklarının Tanımı	LED Işıklarının Anlamı	Açıklama& Çözüm
Sessizlikle bütün LED ışıkların yanmaması	Güç kapalıdır, Tekerlekli sandalye bekleme yada uyku modundadır. Güç zayıf bağlanmıştır. Sigorta atar yada yanar.	
Bütün LED ışıkların yanması	Güç açıktır, kendini tanımlar ve tekerlekli sandalye çok güzel çalışabilir.	Az LED ışıkların yanması, az akü gücü bakiyesi
En soldaki kırmızı ışığın yanması	Akü gücü yetersizdir.	Hemen şarj ediniz. Yada akü arızalıdır ve şarj edilemez.
Beş gösterge ışıkları ile iki defa kısa bip sesinin yanıp sönməsi	Motorun sol tarafı arızalıdır.	Motor sol taraf zayıf bağlanmıştır yada teller bağlanmamıştır.
Beş gösterge ışıkları ile dört defa kısa bip sesinin yanıp sönməsi	Motorun sağ tarafı arızalıdır.	Motor sağ taraf zayıf bağlanmıştır yada teller bağlanmamıştır.
Beş gösterge ışıkları ile altı defa kısa bip sesinin yanıp sönməsi	Kumanda aşırı akım koruma durumundadır.	Frenleri kontrol ediniz ve eğer motor sürüş mekanizması sıkışmışsa kontrol ediniz. Ampermetre akımını kontrol ediniz, eğer aşırı akım yoksa kumanda arızalı olabilir.
Beş gösterge ışıkları ile yedi defa kısa bip sesinin yanıp sönməsi	Joystick arızalıdır.	Joysticki yeniden başlatmayınız, bağlantı kopmuştur.
Beş gösterge ışıkları ile sekiz defa kısa bip sesinin yanıp sönməsi	Kumanda arızalıdır.	Lütfen bakım için satıcınıza danışınız.
Beş gösterge ışıkları ile dokuz defa kısa bip sesinin yanıp sönməsi	Kumanda arızalıdır.	Lütfen bakım için servis merkezine danışınız.

Kumanda Paneli

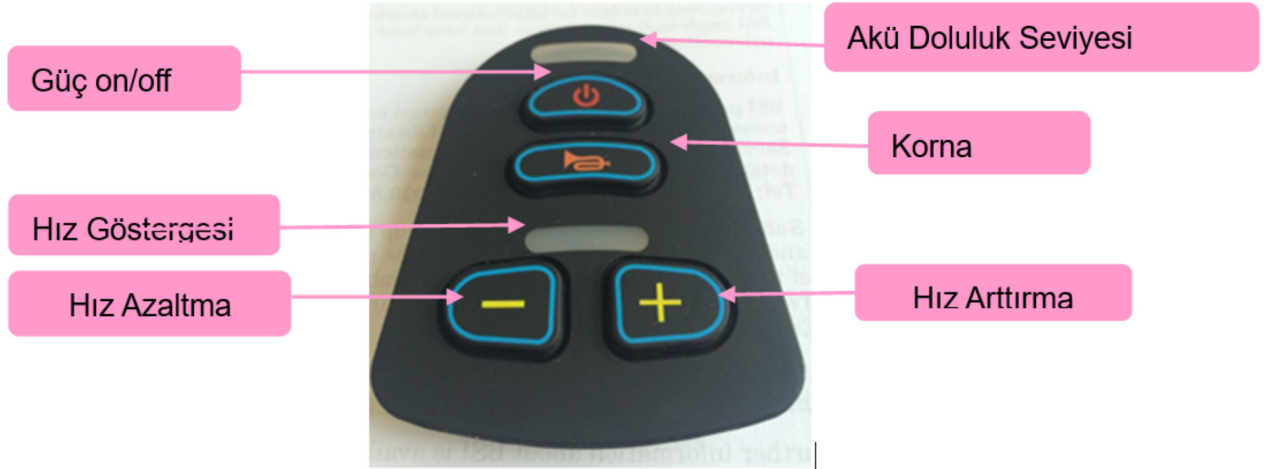

Kumandanın Kullanımı

Güç Sivici (Power Switch)

Bu düğmeye basın, akü güç seviye ışıkları soldan sağa açılacaktır. Tekrar basın Led ışıkları söner.



Bazı acil durumlarda "güç" düğmesine basarak direk kapatabilirsiniz.



Uyku Modu

Eğer joystick 20 dakikadan daha uzun süre çalışmazsa güç otomatik olarak kapanacaktır; ve sistem uyku moduna geçecektir.

Hız Ayarlama

Kullanıcının koşullarına ve alışkanlıklarına göre, tekerlekli sandalye hızı +/- ya basılarak ayarlanabilir. Hız beş kademeli olup ilki maksimum hızın 20% si , diğer kademeleri sırasıyla 40%, 60%, 80%, 100% i olarak artar.



Korna

Kornaya bastığınızda elinizi çekene kadar korna sesi çalar.



Akü Doluluk Göstergesi

Gücü açtıktan sonar , akü göstergesi çalışır. Bu gösterge akünün kalan doluluğunu da gösterir. Örneğin resimdekiinde akü tamamen doludur. Yalnızca kırmızı ya da sarı yandığında ,akü şarj edilmelidir . Uzun süreli şarj için akü tamamen şarj edilmelidir. Eğer yalnızca kırmızı ışıklar yanıyorsa akü bitmek üzeredir ve mümkün olan en kısa zamanda şarj edilmelidir.



Joystick kullanımı

Tekerlekli sandalyenin yönü joystick ile kumanda edilir ayrıca joystick'in hareket genişliği, hareketin hızını da kumanda eder.



Lütfen joystick orta pozisyondayken gücü açın ya da kapatın. Aksi takdirde kumanda yanlış işlem sinyali verecektir. Joystick'i orta pozisyona getirin bu yanlış işlem sinyalini durduracaktır. Eğer hala devam ediyorsa bu parçanın fonksiyonları karışmış olabilir ; bayinizle ya da teknik servisle irtibata geçin ve sandalyenizi kullanmayın.

Sandalyenizin bakımı , temizliği ve de akü şarjını da içerir. Daha ileri düzeydeki bakımlar için bayi/teknik servisle irtibata geçin. Bizim önerimiz 6 ayda bir genel kontrol, yılda bir de bakım yapılmasıdır.

Tekerlekli Sandalyenin Temizliği ve Akünün Bakımı

Lütfen düzenli olarak temizleyin. Sık temas ettiğiniz kol dayama, sırt dayama ve kumanda yeri gibi kısımları hafif nemli bir bezle sıklıkla siliniz . Çözücü v.b. bir madde kesinlikle kullanmayınız ! Yanlızca engeli olan kullanıcılar haftada bir temizleyebilir ama bulaşıcı-enfeksiyonlu hastalarda “dezenfektan” kullanılmalıdır.

Tekerler

Lastiklerin havasını düzenli olarak control edin. Lastik dış derinliği 1mm ye düştüğü zaman yenisiyle değiştirin.

Akü

Akünün doluluk oranını sıklıkla control edin. Akünün ömrünün uzun olması için, aküyü tamamen boşalmasını beklemeden doldurun.

Tekerleklerin tutukluk etmesi (bozukluğu) ve kontrolü

Tekerleklerin dönüşünde tutukluk olduğunda , önce gücü kapatın.

Belirti : Tamamen güç kaybı var ve , kontrol (kumanda) panelindeki Led ışıklar yanmıyor.

Aşağıdaki Adımları Uygulayın

Adım 1: Kumanda kablusunun yerinden çıkmış olup olmadığına bakın.

Adım 2: kablo ve akü arasındaki bağlantının gevşemiş olup olmadığına bakın. Fişi çıkartırken fiş yerinden tutarak çıkartın, kablodan çekmeyin ki kabloya zarar vermesin. Sonra tekrar takın. Kontrollerden sonra hala çalışmıyorsa satıcınızla irtibata geçin.

Kumandanın monitöre, beyin ve motoru tanımlayan bir sistemi vardır. Bu parçalardan birindeki hasar kumanda tarafından gösterilir. Daha fazla detay için ses sinyali kısmına bakın.

Bakım ve Kontrol Listesi

Aracınızı aşağıda sırasıyla verdiğimiz listeyi takip ederek kontrol edebilirsiniz. Aracınıza binerken ya da aracınızdan inerken bazı kontrol otomatik olarak yapılabilir. Daha detaylı kontrol için "A" bölümüne bakınız.

A bölümü	Kullanmadan önce aşağıdaki parçaların doğruluğuna bakınız. 1.Sırt dayama 2.Kol dayama 3.Kumandanın pozisyonu 4.Ayak dinlendirme 5.Akünün doluluğu 6.Manual modu elektrikli moda dönüştürmek için kavrama/ayar kolu
B bölümü	Orijinal parçaların hasar görmesini engellemek için aşağıdaki parçaları ayda bir kontrol ediniz . 1. Vidalar 2. Frenler 3 Manual modu elektrikli moda dönüştürmek için kavrama/ayar kolu 4. Ön/Arka tekerler ve diş derinlikleri 5. Kumanda ve şarj aleti arasındaki bağlantı
C bölümü	Güvenlik için 6 ayda bir yapılacak bakım gereklidir.

Taşıma ve Saklama için koşullar

Taşıma ve saklama esnasında etiketinde belirtildiği gibi doğru konumlanmalıdır.

Taşıma sırasında ıslaklık, güneş ışığı ve aşırı sıcaktan uzak tutulmalıdır.

Elektrikli parçaların rutubetten bozulmaması için aracı yağmurda, dışarıda ve rutubette bırakmayınız.

Saklama şartları :

Hava sıcaklığı $-40^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$;

Nem $\leq 80\%$;

Hava basıncı $86\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$.

Ana Güvenlik Özellikleri

Elektrik şokuna karşı koruma: Dahili güç kaynağı

Sıvı koruması: IPX3.

Alev alan gazlar ya da azot gazına karşı koruma: Non AP/APG type.

Çalıştırma moduna göre : Devam eden çalıştırma .


Voltaj : DC.24V.

Elektroşok ihazına karşı bir koruması yoktur.

Sinyal girdi ya da çıkışı yok.

Geçici yerleştirme ekipmanı

Akü kurulum talimatı

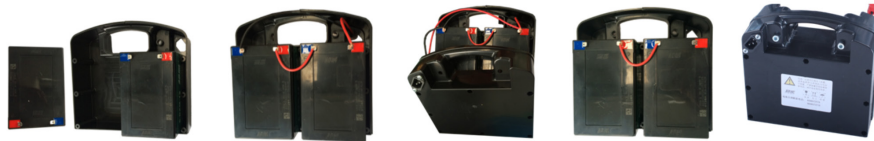

Adım 1: Akü kutusunun vidalarını gevşetin, kapağı çıkartın, aküyü kutunun içine birer birer yerleştirin (resim a).

Adım 2: Kırmızı kabloyu akünün kırmızı kutbuna (pozitif) bağlayın ve lehimleyin

Adım 3: Siyah kabloyu akünün mavi kutbuna bağlayın (katot) ve lehimleyin (resim c).

Adım 4: Akünün kırmızı kutbunu , diğer akünün mavi kutbuna tek bir kırmızı kablo ile bağlayın (resim d).

Adım 5: Akü kutusunu kapatıp vidalayın. (resim e).

GÜNCEL SERVİS LİSTEMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Teknik Veriler

Ana Teknik Veriler	JRWD1002		
Katlanmamış Ölçüler	1140*640*935mm	Katlanmış Ölçüler	735*370*725mm
Koltuk Ölçüsü	450*430mm	Net Ağırlık	45kg
Koltuk ve Ayak Basma Plakası Arasındaki Yükseklik	510/490/460mm	Ayak Basma Plakası ve Zemin Arasındaki Yükseklik	90/65/40mm
Kol Dayama Yüksekliği	230mm	Sırt Dayama Yüksekliği	395mm
Max. Yükleme Kapasitesi	100kg	Ön Teker Çapı	8 inch
Arka Teker Çapı	12 inch	Akü (*2pcs)	12V 20AH
Motor (*2pcs)	250W	Akü Kapasitesi	AC220±10% 50-60HZ
Beyin	35A	Max Sürüş Mesafesi	20km
Koruma Derecesi	IPX3	Max. Güven Eğimi	6°
Dönme Yarıçapı	≤1.2m	Statik Denge	9°
Geri Dönüş Genişliği	1.4m	Tırmanma Açısı	6°
Lastik Basıncı	2Kg/m ²	Engeli Aşabilme	40mm
Zemin Yüksekliği	100mm		

Teknik Veriler

Ana Teknik Veriler	JRWD301		
Katlanmamış Ölçüler	1090*685*930mm	Katlanmış Ölçüler	805*420*730mm
Koltuk Ölçüsü	450*430mm	Net Ağırlık	46kg
Koltuk ve Ayak Basma Plakası Arasındaki Yükseklik	515/480/465mm	Ayak Basma Plakası ve Zemin Arasındaki Yükseklik	100/70/50mm
Kol Dayama Yüksekliği	230mm	Ayak Dayama Yüksekliği	395mm
Max. Yükleme Kapasitesi	100kg	Ön Teker Çapı	8 inch
Arka Teker Çapı	22 inch	Akü (*2pcs)	12V 20AH
Motor (*2pcs)	250W	Akü Kapasitesi	AC 220 (110V) ±10% 50-60HZ
Beyin	35A	Max Sürüş Mesafesi	20km
Koruma Derecesi	IPX3	Max. Güven Eğimi	6°
Dönme Yarıçapı	51.2 m	Statik Denge	9°
Geri Dönüş Genişliği	1.4m	Tırmanma Açısı	6°
Lastik Basıncı	2Kgf/m ²	Engeli Aşabilme	40mm
Zemin Yüksekliği	100mm		

Teknik Veriler

Ana Teknik Veriler	JRWD601		
Katlanmamış Ölçüler	1010*600*1075mm	Katlanmış Ölçüler	710*600*620mm
Koltuk Ölçüsü	450*430mm	Net Ağırlık	61kg
Koltuk ve Ayak Basma Plakası Arasındaki Yükseklik	460/440/400mm	Ayak Basma Plakası ve Zemin Arasındaki Yükseklik	150/130/100mm
Kol Dayama Yüksekliği	230mm	Sırt Dayama Yüksekliği	480mm
Max. Yükleme Kapasitesi	100kg	Ön Teker Çapı	8 inch
Arka Teker Çapı	12 inch	Akü (*2pcs)	12V 20AH
Motor (*2pcs)	250W	Akü Kapasitesi	AC 220 (110V) ±10% 50-60HZ
Beyin	35A	Max Sürüş Mesafesi	20km
Koruma Derecesi	IPX3	Max. Güven Eğimi	6°
Dönme Yarıçapı	≤1.2m	Statik Denge	9°
Geri Dönüş Genişliği	1.4m	Tırmanma Açısı	6°
Lastik Basıncı	2Kgf/m ²	Engeli Aşabilme	40mm
Zemin Yüksekliği	100mm	Sırt Dayama Ayar Açısı	≥30°

1-GARANTİ KAPSAMI

. Garanti süresi, Garanti Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

. Garanti Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilir olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.

. Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.

2-GARANTİ SÜRESİ:

Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa) dır.Garanti süresi içerisinde değiştirilen mamullerde garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

a) Mamulün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir. İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerle tamir süresinin 20 iş gün üzerine çıkması durumunda tüketici, işbu gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir maddi manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacaktır.

b) Mamulümüzün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım, onarım ve işçilik masrafı ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.

c) Satışa arz edilen mamullerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımızca verilecek rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılabilecektir.

d) Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servisler tarafından yapılması ve ilgili yerlerin kaşelenip, imzalanması gerekir. Ayrıca, garanti süresinin devam edebilmesi için kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edeceği orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça değişimlerinde Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili

servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan parça değişimleri ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.

e) Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmaktadır. Garanti Belgesi ve Bakım Kartı olmaksızın yapılan başvurularda ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.

f) Garanti uygulaması yalnızca imalatçı /distribütör firmanın yetkili servis istasyonlarında yapılması halinde geçerlidir.

3- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine getirmediğimiz takdirde ise durum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

4- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadırlar. İşbu bildirimin yapılmaması durumunda Kullanıcı, imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. (Bildirimin telefonla da yapılabileceği hüküm altına alınmışsa da, takdir size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve

Noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde yapılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz.)

5- Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN UYGULAMALAR:

a-) Ücretli bakımda yapılması gereken işler:

Kontrol sıkma, motor ayarı, ayar yapma, temizleme vb. işlemler garanti kapsamı dışında ücreti mukabilinde yapılacaktır.

b-) Ücretli bakımda değiştirilebilecek parçalar:

Buji, yağ ve hava filtreleri, kondenserler, sigortalar, fren ve debriyaj balataları, ampuller, tahrik kayışı ve tüm kumanda telleri, kablolar, rulmanlar, gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir.

c-) Zaman kaybı, zarar, ziyan, gelir kaybı, aracın arızalı yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan zararlar da garanti kapsamı dışındadır.

6- AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA MAMÜL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte yağların dışında başka yağların kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar.

b) Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen arızalar.

c) Araca istiap haddinin üzerinde aşırı yük konulması.

d) Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluşlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değişiklik yapılması.

e) Aracın spor müsabakalarında kullanılması.

f) Aracın arızalanması durumunda kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi.

g) Ücretli periyodik bakımlardan herhangi birisinin yetkili servislerde ve zamanında (bakım kartında belirtilen km'lerde) yaptırılmaması.

h) Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak arızalar.

ı) İmalatçı / ithalatçının kontrolü dışındaki faktörler ile oluşan hasarlar;

- Hırsızlık, ayaklanma, yangın, çarpışma v.b. kazalar

- Asit yağmuru, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu, paslanmalar

(kimyevi maddeler ağaç öz suyu v.b.)

- Dolu, fırtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler

- Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler.

7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis istasyonlarımıza başvurulmalıdır.

ARAÇ TESLİMATI

Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. araçları imal ederken/ettirirken bir dizi kalite kontrolüne tabi tuttuğu gibi, bayiinizden de aracınızı teslim ederken kapsamlı bir test yapmasını istemektedir.

1. Aracınızı size tam olarak tanıtacak ve aracınızı test etmenizi sağlayacak
2. Garanti belgesindeki ilgili kaynakları, araç sahibi ve araçla ilgili bilgileri anlatacak
3. Araç kullanma kılavuzunu verecek, bakım ve servis hizmetlerini anlatacak.

ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI

Araç sahibi, "Garanti Belgesi" ve "Kullanma ve Bakım El Kitabı"nda belirtilen açıklamalara uygun hareket ederek aracın periyodik bakımlarının düzenli yapılmasından sorumludur. Her bakım kontrolünden sonra, gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapıp, servis kaşesinin vurulduğundan emin olunmalıdır. Böylece bu

işlem araç bakımının yapıldığını belgelemiş olacaktır. Eğer kareajlarda çizik, çentik gibi hasar tespit ettiyseniz bunları hemen teslim anında bayiye bildiriniz ve o halde aracı

teslim almayınız. Ayrıca araç sahibi, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.Yetkili Parça Bayi veya Yetkili Servislerinden temin edeceği orijinal parçaları

kullanmak zorundadır. İşbu madde hükmüne uymayan araç sahibine ait ürün, garanti süresi dolmamış olsa dahi garanti kapsamı dışında kalacaktır.

GARANTİ KAYIT BELGESİ

YUKİ MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.

SATIŞ TARİHİ :...../...../.....

YUKİ MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş. Yetkili bayisinin, bana satmış olduğu aracın garanti belgesini, kullanma ve bakım el kitabını okuyarak aldığım ve araç sahibinin sorumluluklarını kitapçıkta yazıldığı gibi ve aşağıdaki şartlar dahilinde kabul ettiğimi tasdik ederim.

- 1.Garanti şartlarını ve müddetini, (2 yıl)
- 2.Periyodik bakım yapmanın önemini, periyodik bakımlardan herhangi birisinin yapılmaması durumunda garantiden faydalanamayacağımı,
- 3.Yaptığım muayene neticesi teslim öncesi kontrolden geçen aracın herhangi bir eksiği bulunmadığını kabul ederim.

ARACI SATIN ALANIN;

Adı Soyadı:.....

Adres :.....

Tel :.....

Araç sahibinin İmzası

yuki[®]
motor