



MY FRIEND

Kullanım ve Bakım Klavuzu

GÜVENLİK UYARISI

- *Sürüşten Önce*
- *Sürüş Esnasında*
- *Tren Raylarını Geçerken*
- *Çalıştırma Paneli*
- *Güç Düğmesi*
- *Hız Ayarlama*
- *İleri Geri ve Frenleme*
- *Sinyal Lambası Şalteri*
- *Korna Düğmesi*
- *Anahtar deliği Güç Anahtarı Işık Anahtarı*
- *Frenleme*
- *Koltuk*
- *Akü Durumu Ölçer*
- *Freewheel modu nasıl ayarlanır*

ÇALIŞTIRMA

- *Direksiyon Açısı Ayarlama*
- *Çalıştırma ve Sürüş*
- *Sürüş Hızı Hakkında*
- *Durdurma*

MUAYENE VE BAKIM

- *Günlük Kontrol*

SORUN GİDERME

- *Yapılması Gerekenler*

*TEKNİK ÖZELLİKLER**SERVİS LİSTESİ**GARANTİ ŞARTLARI*

Sayın Müşterimiz

Lütfen bu aracı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz, aracın yanlış kullanılması zarar, yaralanma veya kazalara neden olabilir.

Bu kullanıcı el kitabı, bu aracın tüm yönleri, montaj ve olası kazalarla nasıl başa çıkılacağına ilişkin kullanım talimatlarını içerir.
Bu kullanıcı el kitabı sadece DL24800-3 için yazılmıştır.

Uyarı: bu aracın yanlış kullanılması ciddi yaralanmalara neden olabilir Dikkat: Bu aracın yanlış kullanılması kişisel yaralanmalara ve / veya mülke zarar verebilir. Öneri: Aracın güvenli ve verimli çalışmasını ve fonksiyonlarını korumak için bu talimatları izleyin.

Sağlıklı Günler Dileriz.

Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.

yuki
motor

Sürüşten önce

Kullanıcı, aracı sürmeden önce bu aracı çalıştırmak için tüm fonksiyonları ve özellikleri öğrenmelidir. Lütfen daima güvenliği aklınızda tutun.

Kullanıcının eğitimli bir asistana sahip olması gereken durumlar olabilir, böylece kullanıcı aracın işlemlerine ve işlevlerine aşina olabilir. Asistan bir aile üyesi veya bir bakım profesyoneli olabilir.

Herhangi bir kişisel yaralanmayı en aza indirmek için, sürüş öncesinde aşağıdaki güvenlik önlemlerinin tümünü okuyun.

Yayalara uygulanan aynı trafik kuralları bu aracın kullanımı için de geçerlidir.

- ❑ Sadece kaldırıma, park alanına veya yaya alanlarına binin. Asla otoyollara veya yollara binmeyin. Aracınızı sürerken trafiğin sizi görmesi zor olabilir. Etrafınızdaki tüm engellerden daima haberdar olun (arabalar, insanlar, arazi ve hava durumu).
- ❑ Aracınızı yoğun alanlarda, alışveriş merkezinde, iş merkezlerinde vb. kullanırken çok dikkatli olun.
- ❑ Reçeteli ilaçlar kullanıyorsanız, aracı kullanmadan önce doktorunuza danışın. Bazı ilaçlar, aracınızın güvenli bir şekilde çalışmasını sağlama yeteneğinizi zayıflatır.
- ❑ Lütfen alkolün etkisinde olduğunuzda aracı kullanmayın; bu, aracınızı güvenli bir şekilde kullanma becerinizi bozabilir.
- ❑ Lütfen yaya trafik ışıklarını takip edin.

Aracınızı kullanma alıştırması

Kullanıcı aracı sürerken dikkatli ve sağduyulu olmalıdır.

Aracınızın kullanımına aşina olurken, lütfen park gibi geniş bir alanda pratik yapın.

Aracı sürerken aracınızdan düşmemeniz için, hızlanma, durma, dönme gibi sürüş hareketlerini göz önünde bulundurun, geri ve yukarı-aşağı rampalar gibi.

Sürüşten Önce

- ❑ Lütfen ilk alıştığınız sırasında hız kadranını düşük hızda ayarlayın.
- ❑ İlk kez aracı kullanırken birisinin size eşlik etmesini ve güvenliğinize dikkat etmesini sağlayın.
- ❑ Aracınızı kolayca ve güvenli kontrol edip kullanabildiğinizden emin olun.
Ardından aracınızı daha yüksek bir hızda ayarlayabilirsiniz.

DL24800-3 aracı bir yolcu ile sınırlıdır.

Araçta yolcu taşımayın (çocuklar dahil)

Bu aracı mal taşımak veya çekmek için kullanmayın.

- ❑ Taşınabilecek maksimum ağırlık 140kg'dır (mallar dahil).
- ❑ Sepet için maksimum yükleme ağırlığı 5 kg.

Sürüş Esnasında

Lütfen günlük kontroller yapın.

Hareket halindeyken vücudunuzu araçtan dışarı doğru uzatmayın.

- ❑ Bu tür hareketler , dengenizi kaybetmenize veya düşme nedeniyle yaralanmanıza neden olabilir.
- ❑ Giysilerinizin tekerleklerle dolaşmamasına dikkat edin.

Tren Raylarını Geçerken

- ❑ Kavşağa girmeden önce lütfen tamamen durun. Geçiş esnasında, araç tekerleklerinin piste sıkışmamasına dikkat edin.
- ❑ Aracınızı aşağıdaki şartlar altında kullanmayın.
- ❑ Yoğun trafikte, çamurlu, çakıllı, tümsekli, karlı veya buzlu yollarda.
- ❑ Herhangi çit ve bariyeri olmayan kanal veya su yollarında veya çok dar olan yollarda dikkatli olun. Bu koşullar aracınızın performansını etkileyebilir ve bir kazaya veya yaralanmaya neden olabilir.

Tekerleklerinizin sıkışabileceği yerlerden uzak tutun.

- ❑ Gece veya yağmurlu, karlı, sisli veya yağışlı havalarda araç sürmeyin. Bu koşullar güvenli sürüş yeteneğinizi etkileyebilir ve bir kazaya veya yaralanmaya neden olabilir.
- ❑ Aracınız merdivenlerde veya yürüyen merdivenlerde yukarı veya aşağı hareket edecek şekilde tasarlanmadı, always, asansör kullanın.

Cep telefonu ve diğer elektrikli cihazlar hakkında

- ❑ Aracı kullanırken cep telefonu veya başka bir kablosuz iletişim cihazı kullanmayınız.
- ❑ Cep telefonunuzu veya diğer elektronik cihazlarınızı aracın aküsünden şarj etmeyiniz.

Rampalar, eğimler, inişler

- ❑ Dik rampalara sürmeyin.
- ❑ Eğimli bir yola gelirken, lütfen yavaş sürün. Hızı orta ayara getirmelisiniz.
- ❑ Güvenli bir hızda kalmak ani durma veya başlamadan kaçınmak iyi bir fikirdir. İniş esnasında, güvenli ve kontrollü bir iniş sağlamak için hız düşük ayara getirilmelidir.
- ❑ İniş esnasında aracı asla geriye doğru sürmeyin.
- ❑ Geniş olukları üzerinden geçmeyin, jantınızın sıkışmasına neden olabilir.
- ❑ Çakıl yollarda veya rampalarda sürüş sırasında ani dönüş yapmayın.
- ❑ Aracınızın güvenli bir şekilde performans göstermeyeceğinden şüpheleniz var ise arazi veya engellerden kaçının.
- ❑ Birçok binada 180 derecelik dönüşlü rampalar mevcut, bu nedenle korkuluklara yakalanmamak veya yaralanmaya neden olabilecek herhangi bir engelden kaçınmak için dönüş becerilerinizi geliştirmeniz önerilir.


*Aracı yokuş aşağı sürerken serbest tekerlek modunda tutmayınız. Bu, kullanıcının aracın hızını kontrol edememesine neden olabilir.
Aracınızı yeniden çalıştırmak için gücü tekrar açın.*

Maksimum kullanıcı ağırlık limiti

* AĞIRLIK KAPASİTESİ. * Sınırlamanın aşılması, aracınızın hasar görmesine veya arızalanmasına neden olabilir ve yaralanmalara neden olabilir.

Maksimum kullanıcı ağırlık limiti

- 1.Hız Ayarlama Düğmesi
- 2.Dikiz Aynası
- 3.Kontrol Paneli
- 4.Direksiyon Ayar Kolu
- 5.Sepet
- 6.Ön Lamba
- 7.Sinyal Lambası
- 8.Ön Tampon
- 9.Baş Dayacağı
- 10.Kol Dayanağı
- 11.Koltuk
- 12.Koltuk Açısı Ayar Çubuğu
- 13.Arka Far Anahtarı
- 14.Freewheel Mod Kolu

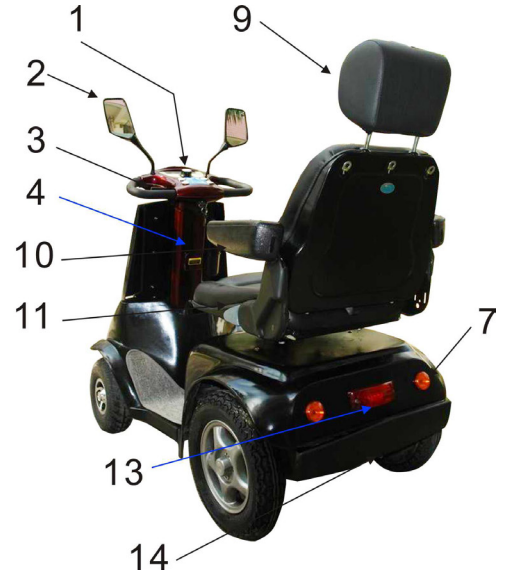

Çalıştırma Paneli

Maksimum kullanıcı ağırlık limiti

1. Hız Ayarlama Düğmesi
2. Korna Düğmesi
3. Acil Durum Freni
4. Sinyal Açma-Kapama Düğmesi
5. Anahtar Deliği/Ön Far/Arka Far Anahtarı
6. Hız Kontrol Kolu
7. Akü Durumu Ölçer

Aracınızı nasıl çalıştırırsınız

Güç Düğmesi

AÇMAK veya KAPATMAK için anahtarı çevirin.

ON: Güç açık

OFF: Işıklar açılmadan güç kapatılıyor

LIGHT (IŞIK): Güç ve ışıklar açık.

Hız Ayarlama

Kullanıcının ileri ve geri hızını buna göre ayarlamasına izin verir.

İleri Geri ve Frenleme

Hız kontrol kolunu sağ elinizle aşağı çekin ve araç ileri doğru hareket edecektir. Hız kontrol kolunu sol elinizle aşağı çekin, araç geriye doğru hareket eder. Araç geri vitesteyken korna bip sesi çıkarır. İleri veya geri yönde iken hız kontrol kolunu serbest bırakın, motordaki elektromanyetik fren devreye girecek ve araç duracaktır.



Sinyal Lambası Şalteri

Işık yanıp sönecek ve sesli uyarı düğmelerine basıldığında "klik - tık" sesi çıkacaktır.(Oklar ile gösteriliyor.)

Sol sinyal lambası ⇔ Sağ sinyal lambası

Değiştirme düğmesine tekrar basıldığında sinyal lambası kapanır.

Korna Düğmesi

Düğmeye basıldığında uyarı kornası devreye girecektir.

Anahtar deliği Güç Anahtarı Işık Anahtarı

Anahtarı "ON" durumuna getirmek aracı çalıştırmaya başlayacaktır. Anahtarı "LIGHT" konumuna çevirmek hem ön hemde arka farı açacaktır.

Frenleme

Elektromanyetik fren: Hız kontrol kolunu tamamen serbest bırakın, elektromanyetik fren devreye girecektir.

Koltuk

1. Koltuk 45 dereceye veya 90 dereceye döndürülebilir.
2. Açığı değiştirmek için koltuk ayar çubuğunu aşağı doğru bastırın.

Akü Durumu Ölçer

1. Güç düğmesi açıldığında, pil ölçer, pilin kalan gücünü belirten 5 LED ışığıyla yanacaktır. Tüm 5 LED ışıklar: güç dolu. Bip 1 LED ışık.Uyarı: güç bitti.
2. Akü ölçer tarafından gösterilen kalan güç, sürüş süresine ve aracın sürüş şekline göre değişir.Tekrar tekrar başlatma, durdurma ve tırmanma gücü daha çabuk tüketir.

Freewheel modu nasıl ayarlanır

- 1.Sürüş Modunda: kolu tamamen aşağıya doğru bastırın, araç motor gücü ile sürülebilir.
2. Free-wheel Modu: Kolu tamamen yukarı kaldırın , araç manuel olarak hareket ettirilebilir.

Direksiyon Açısı Ayarlama

Direksiyon açısı, aşağıdaki adımları izlenerek 0 ° 80 ° arasında ayarlanabilir.

1. Direksiyon paneli içerisindeki ayar kolunu çekin.
2. Direksiyonu, istediğiniz açıya ayarlayın.
3. Kolu bırakın , direksiyon otomatik olarak istenen açıda sabitlenir.

Çalıştırma ve Sürüş

1. Koltuğun uygun şekilde takıldığından emin olun.
2. Direksiyonun uygun şekilde sabitlendiğinden emin olun.
3. Kolçakların en alt konuma getirildiğinden emin olun. (Uygunsa)
4. Gerekirse güç düğmesini "ON" konumuna getirin., farları açın.
5. Seyahatiniz için yeterli güç olup olmadığını görmek için pil ölçeri kontrol edin. Herhangi bir şüpheniz varsa, lütfen şarj edin.
6. Uygun hız ayarlayın.
7. İleri / geri hız kolunun çalışır durumda olduğundan emin olun.
8. Elektromanyetik frenin çalışır durumda olduğundan emin olun.

Sürüş Hızı Hakkında

Hız ölçer hız ayarlama düğmesi üzerine basılmıştır, soldan (En düşük hız) sağa doğru. (En yüksek hız)

Durdurma

1. Hız kontrol kolunu tamamen serbest bırakın. Araç kendiliğinden fren yapar ve durur.
2. Güç düğmesini "OFF" konumuna getirin. Sonra anahtarı çekin.



Günlük Kontrol

Sürüşe başlamadan önce aşağıdaki maddeleri kontrol edin.

Madde	Muayene İçeriği
Gidon	Gevşekler mi ? Sola ve sağa sorunsuz döndürülebilir mi?
Hız Kontrol Kadranı	Serbestçe ayarlanabilir ve düzgün çalışıyor mu?
Hız Kontrol Kolu	Kol aşağı bastırıldığında araç hareket ediyor mu? Kol bırakıldığında araç duruyor mu?
Motor	Motordan gelen anormal sesler var mı? Elektromanyetik fren düzgün çalışıyor mu?
Freewheel Modu	Freewheel mod kolu düzgün çalışıyor mu?
Akü Durumu Ölçer	Güç açıldığında ışık yanıyor mu? Kalan güç, seyahatiniz için yeterli mi?
Korna	Korna düzgün çalışıyor mu?
Dönüş Sinyali	Dönüş sinyali düzgün çalışıyor mu?
Ön Far	Far düzgün çalışıyor mu?
Stop Lambası	Stop lambaları düzgün çalışıyor mu?
Koltuk	Koltuk sorunsuz şekilde döndürülebilir ve ayarlanabilir mi?
Dikiz Aynası	Düzgün ayarlandı mı veya kırıldı mı?
Lastikler	Lastiklerde çatlak veya başka bir hasar var mı? Lastik uygun şekilde şişirildi mi? Lastiklerin diş derinliğini kontrol edin.
Diğer	Herhangi bir anormal ses var mı? Şanzıman kutusunda yağ sızıntısı var mı?

Yapılması Gerekenler

Aracınızla ilgili herhangi bir problem yaşadığınızda aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Sorun	Yapılması Gerekenler
Aracınızı başlatamıyorsanız	Güç düğmesi OFF yönünde mi ? ↓ Güç düğmesini ON a doğru çevirin.
	Akü dolu mu? Pil gösterge ışığı açık mı? ↓ Aküyü şarj ediniz.
	Şarj cihaza araca bağlı mı? ↓ Şarj cihazını fişten çekin ve kabloyu bir kenara koyun. Free Wheel kolunun yerine oturduğundan emin olun.
Aracınız ilerlemiyor ise	

Model	DL24800-3	
Paket Boyutu	1320*720*870 mm	
Toplam Yükseklik	1160mm	
Toplam Uzunluk	1220mm	
Toplam Genişlik	630mm	
Motor Çıkışı	DC24V 800W	
Akü	12V45AH*2PCs	
Beyin	24V110A	
Şarj Aleti	24V5A	
Şarj Süresi	9-10 Saat	
Ön Tekerlek	4.10/3.50-4	
Arka Tekerlek	3.0-8	
Aks Mesafesi	820mm	
Fren Sistemi	Akıllı rejeneratif elektromanyetik fren	
Net Ağırlık (Akü ve Koltuk ile)	108KG	
Maksimum Yükleme	130KG	
Rampa Tırmanma	13 derece	
Şarj Başına Mesafe	45KM	
Maksimum Hız	1-15km/h (opsiyonlu)	
Maksimum Geri Hız	1-6.6 km/h (opsiyonlu)	
Dönme Çapı	2100mm	
Yerden Yükseklik	100mm	
Fren Aralığı	<4m	

GÜNCEL SERVİS LİSTEMİZE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

1-GARANTİ KAPSAMI

. Garanti süresi, Garanti Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

. Garanti Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilir olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.

. Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.

2-GARANTİ SÜRESİ:

Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa)dır.

Garanti süresi içerisinde değiştirilen mamullerde garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

a) Mamulün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir. İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerle tamir süresinin 20 iş günü üzerine çıkması durumunda tüketici, işbu gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir maddi manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacaktır.

b) Mamulümüzün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım, onarım ve işçilik masrafı ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.

c) Satışa arz edilen mamulimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımızca verilecek rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılabilecektir.

d) Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servisler tarafından yapılması ve ilgili yerlerin kaşelenip, imzalanması gerekir. Ayrıca, garanti süresinin devam edebilmesi için kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edeceği orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça değişimlerinde Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili

servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan parça değişimleri ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.

e) Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmaktadır. Garanti Belgesi ve Bakım Kartı olmaksızın yapılan başvurularda ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.

f) Garanti uygulaması yalnızca imalatçı /distribütör firmanın yetkili servis istasyonlarında yapılması halinde geçerlidir.

3- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine getirmediğimiz takdirde ise durum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

4- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadırlar. İşbu bildirimin yapılmaması durumunda Kullanıcı, imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. (Bildirimin telefonla da yapılabileceği hüküm altına alınmışsa da, takdir size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve

Noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde yapılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz.)

5- Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN UYGULAMALAR:

a-) Ücretli bakımda yapılması gereken işler:

Kontrol sıkma, motor ayarı, ayar yapma, temizleme vb. işlemler garanti kapsamı dışında ücreti mukabilinde yapılacaktır.

b-) Ücretli bakımda değiştirilebilecek parçalar:

Buji, yağ ve hava filtreleri, kondenserler, sigortalar, fren ve debriyaj balataları, ampuller, tahrik kayışı ve tüm kumanda telleri, kablolar, rulmanlar, gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir.

c-) Zaman kaybı, zarar, ziyan, gelir kaybı, aracın arızalı yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan zararlar da garanti kapsamı dışındadır.

6- AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA MAMÜL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte yağların dışında başka yağların kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar.

b) Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen arızalar.

c) Araca istiap haddinin üzerinde aşırı yük konulması.

d) Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluşlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değişiklik yapılması.

e) Aracın spor müsabakalarında kullanılması.

f) Aracın arızalanması durumunda kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi.

g) Ücretli periyodik bakımlardan herhangi birisinin yetkili servislerde ve zamanında (bakım kartında belirtilen km'lerde) yaptırılmaması.

h) Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak arızalar.

ı) İmalatçı / ithalatçının kontrolü dışındaki faktörler ile oluşan hasarlar;

- Hırsızlık, ayaklanma, yangın, çarpışma v.b. kazalar

- Asit yağmuru, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu, paslanmalar

(kimyevi maddeler ağaç öz suyu v.b.)

- Dolu, fırtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler

- Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler.

7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis istasyonlarımıza başvurulmalıdır.

ARAÇ TESLİMİ

Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. araçları imal ederken/ettirirken bir dizi kalite kontrolüne tabi tuttuğu gibi, bayiinizden de aracınızı teslim ederken kapsamlı bir test yapmasını istemektedir.

1. Aracınızı size tam olarak tanıttacak ve aracınızı test etmenizi sağlayacak
2. Garanti belgesindeki ilgili kaynakları, araç sahibi ve araçla ilgili bilgileri anlatacak
3. Araç kullanma kılavuzunu verecek, bakım ve servis hizmetlerini anlatacak.

ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI

Araç sahibi, "Garanti Belgesi" ve "Kullanma ve Bakım El Kitabı"nda belirtilen açıklamalara uygun hareket ederek aracın periyodik bakımlarının düzenli yapılmasından sorumludur. Her bakım kontrolünden sonra, gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapılması, servis kaşesinin vurulduğundan emin olunmalıdır. Böylece bu

işlem araç bakımının yapıldığını belgelemiş olacaktır. Eğer kareajlarda çizik, çentik gibi hasar tespit ettiyseniz bunları hemen teslim anında bayiye bildiriniz ve o halde aracı

teslim almayınız. Ayrıca araç sahibi, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Parça Bayi veya Yetkili Servislerinden temin edeceği orijinal parçaları

kullanmak zorundadır. İşbu madde hükmüne uymayan araç sahibine ait ürün, garanti süresi dolmamış olsa dahi garanti kapsamı dışında kalacaktır.

GARANTİ KAYIT BELGESİ

YUKİ MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.

SATIŞ TARİHİ :...../...../.....

YUKİ MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş. Yetkili bayisinin, bana satmış olduğu aracın garanti belgesini, kullanma ve bakım el kitabını okuyarak aldığım ve araç sahibinin sorumluluklarını kitapçıkta yazıldığı gibi ve aşağıdaki şartlar dahilinde kabul ettiğimi tasdik ederim.

1. Garanti şartlarını ve müddetini, 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa)dır.
2. Periyodik bakım yapmanın önemini, periyodik bakımlardan herhangi birisinin yapılmaması durumunda garantiden faydalanamayacağımı,
3. Yaptığım muayene neticesi teslim öncesi kontrolden geçen aracın herhangi bir eksiği bulunmadığını kabul ederim.

ARACI SATIN ALANIN;

Adı Soyadı:.....

Adres :

Tel :

Araç sahibinin İmzası

yuki[®]
motor